

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Guia de Colocação e Ajuste



1

- Segure as almofadas sobre o nariz e puxe o arnês sobre a cabeça.
- O arnês deve ser posicionado a meio caminho entre as orelhas e os olhos.



2

- Ajuste primeiro a correia superior.
- Puxe a correia através da fivela, um furo de cada vez.
- Não aperte excessivamente.



3

- Ajuste a correia traseira para fazer um ajuste fino, se necessário.
- Não aperte excessivamente.
- A correia traseira pode ser posicionada sobre ou sob o cabelo.



4

- As almofadas Swift FX são projetadas para oferecer um ajuste natural.
- Pequenos ajustes podem ajudar a posicionar as almofadas no ângulo mais confortável no nariz.



5

- Conecte o tubo curto da Swift FX ao tubo de ar do dispositivo.
- A Swift FX já está ajustada e pronta para uso.



DICA

- Com o dispositivo ligado, verifique se as almofadas nasais estão devidamente infladas. Para isso, afaste as almofadas nasais do rosto e certifique-se de que estão infladas. Em seguida, reposicione-as no nariz.

ENVOLTÓRIOS MACIOS OPCIONAIS

- Prenda cada envoltório macio em torno de cada lado do arnês, dobrando o fecho superior sobre o inferior.
- Os envoltórios macios devem ser posicionados sobre as bochechas, com os fechos voltados para fora.



Nota: para obter informações adicionais, consulte o *Manual do Usuário do Sistema de Almofadas Nasais Swift FX*.

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Menos máscara. Mais você.

- Desenho minimalista que reforça a sensação de liberdade
- Maciez, simplicidade e estabilidade sem precedentes
- Formato flexível e fluido acompanha os contornos faciais e os movimentos do usuário
- Promove aceitação rápida do tratamento
- Ajuste intuitivo, praticamente instantâneo
- Desempenho estável, mesmo a pressões altas


As almofadas nasais de parede dupla vedam por contato de forma suave e confortável, oferecem uma ampla faixa de ajustes e dispersam o ar suavemente para o nariz

A almofada macia e estreita com câmara flexível integrada torna confortável dormir de lado e ajuda a manter a vedação durante o movimento

O cotovelo ultra-macio com rotação de 360° gira com facilidade e fluidez, permitindo maior flexibilidade de posições do tubo

Respiradouros silenciosos dispersam e direcionam o fluxo de ar silenciosamente para longe do usuário e do parceiro de cama

O tubo leve e ultra-flexível se estende e dobra de forma exclusiva para maior estabilidade sem o uso de um retentor de tubo

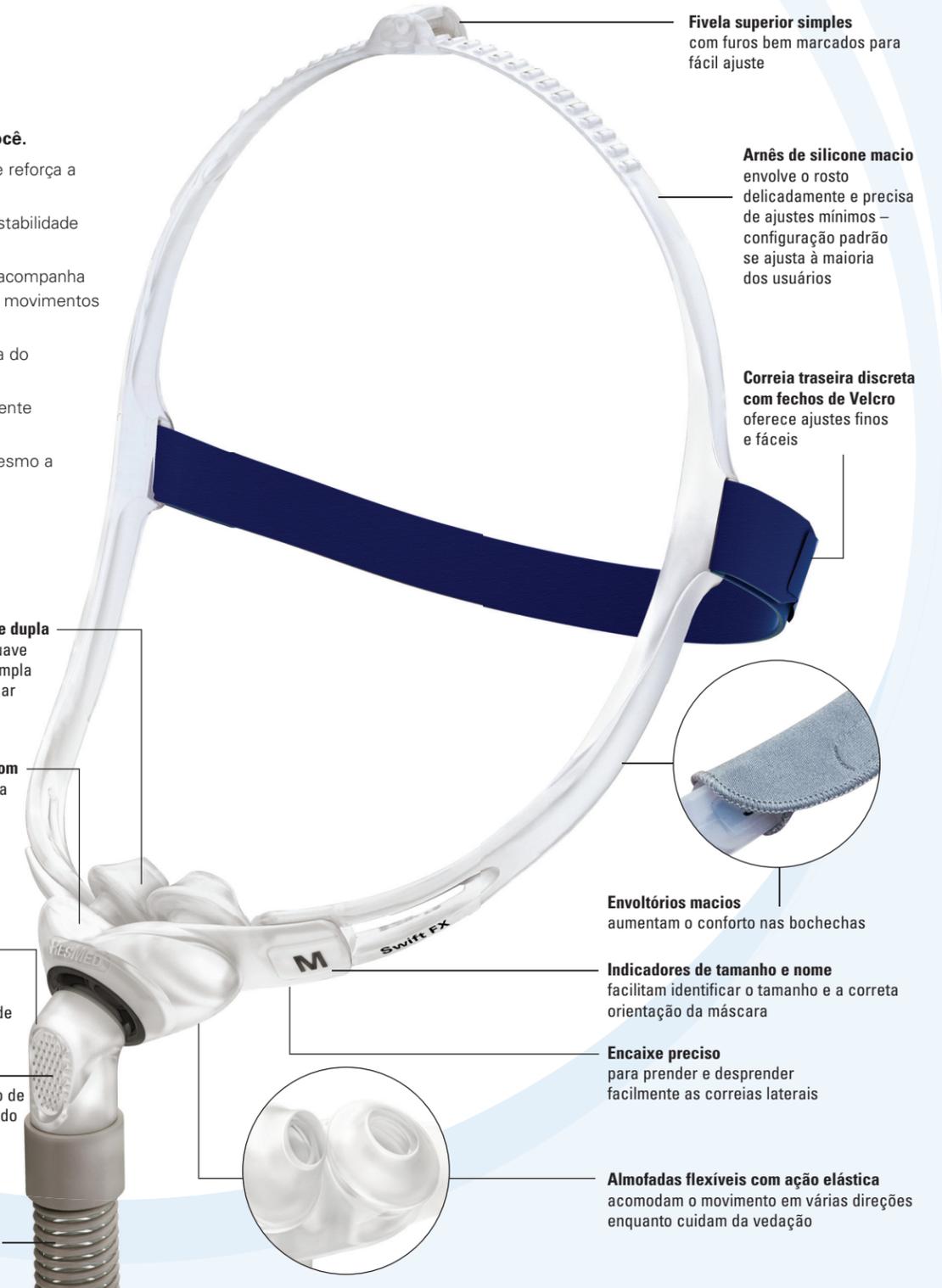

Fivela superior simples com furos bem marcados para fácil ajuste

Arnês de silicone macio envolve o rosto delicadamente e precisa de ajustes mínimos – configuração padrão se ajusta à maioria dos usuários

Correia traseira discreta com fechos de Velcro oferece ajustes finos e fáceis

Envoltórios macios aumentam o conforto nas bochechas

Indicadores de tamanho e nome facilitam identificar o tamanho e a correta orientação da máscara

Encaixe preciso para prender e desprender facilmente as correias laterais

Almofadas flexíveis com ação elástica acomodam o movimento em várias direções enquanto cuidam da vedação



DESTAQUES DA MÁSCARA

Conforto todo o tempo

- Com contato facial mínimo e um design discreto, a Swift FX torna o tratamento menos intimidante e mais fácil de ser aceito desde o início.
- Da ponta das almofadas nasais às laterais macias e protegidas, dos envoltórios macios confortáveis à correia traseira discreta... a Swift FX é tão leve e delicada que os pacientes até esquecem que ela existe.
- As correias justas do arnês fazem o trabalho de manter a vedação, de modo que o ajuste parece suave e não há necessidade de apertar em excesso o arnês.

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Conforto suave, desempenho estável

- O design maleável de todo o sistema aumenta o conforto.
- As almofadas nasais de parede dupla e a base de amortecimento flexível mantêm a vedação enquanto se adaptam ao movimento.
- O tubo leve e flexível reduz a tensão sobre a máscara e aumenta a estabilidade.

Os pacientes até esquecem que ela existe

- O design mínimo reforça o senso de liberdade – isso tem a ver com o contato da máscara sobre o rosto e seu visual.

Permite dormir em várias posições

- Os usuários da Swift FX podem dormir de lado ou de costas, posicionando o tubo como desejarem.

Funcionamento silencioso para um sono tranquilo

- Design de respirador inovador permite um funcionamento super-silencioso – e dispersa suavemente o ar para longe do paciente e de seu parceiro de cama.

VANTAGENS PROFISSIONAIS

Ajuste intuitivo, praticamente instantâneo

- Poupa um valioso tempo dos médicos e profissionais do sono. Depois de selecionado o tamanho de almofada certo, o ajuste é mínimo.

Vedação estável a pressões altas

- Dotado de um projeto exclusivo, o sistema permanece no lugar e mantém a vedação com eficácia, mesmo a pressões de tratamento altas.*

Fácil aceitação da terapia por parte dos pacientes

- Projetada para ser atraente, a Swift FX é uma máscara que não intimida, facilitando a aceitação da terapia desde o início.

Menor estoque, grande faixa de ajuste (>95%)**

- Três tamanhos de almofadas acompanham o produto, para ajuste à maioria dos usuários, reduzindo o estoque.
- Existe ainda um tamanho Extra Pequeno.

Fácil manuseio do produto

- Com muito poucas peças, a Swift FX é fácil de limpar e montar.

Conveniente para recomendar ou prescrever

- O manual do usuário e o suporte on-line facilitam o treinamento para usuários e profissionais.



CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Sistema de Almofadas Nasais Swift FX

Américas **61500**

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Cartão de componentes

Sistema completo

61500 (inclui almofadas nasais Pequenas (P), Médias (M) e Grandes (G)*)

Sistema de armação

(sem arnês)

EP* **61510**

P **61511**

M **61512**

G **61513**

Montagem do arnês
(arnês, correia traseira)
61529

Conjunto de tubo curto
(tubo curto, cotovelo e peça giratória)
61528 (1)
61527 (10)

Almofadas
EP* **61520**
P **61521**
M **61522**
G **61523**

Envoltórios macios
61530 (2)

* As almofadas do tipo Extra Pequeno (EP) estão disponíveis separadamente

* Avaliada até 20 cm H₂O em testes clínicos

** Com base em pesquisa de mercado da ResMed